

Ducha bitermica tropical de obra



Manual de uso e instalación

ÍNDICE

La hidroterapiaPág.1

Efectos terapéuticos de la ducha bitermica..... Pág.1

- Reacción nerviosa.
- Reacción circulatoria.
- Reacción térmica.

Origen y evoluciónPág.2

Descripción de la ducha tropical.....Pág.3

Instalaciones previas Pág.4

Sistema constructivo de la ducha. Vista planta.....Pág.5

Sistema constructivo de la ducha. Vista alzado..... Pág.6

Sistema constructivo del equipo hidráulico.....Pág.7

Sistema constructivo kit sobre prestaciones.....Pág.7

Consumo, consumo total y esquema hidráulicoPág.7

Requisitos indispensables para el montaje.....Pág.9

Instalaciones previas al montaje.....Pág.9

Situación de la maquinaria.....Pág.10

Encendido del equipoPág.11

Lista de duchasPág.11

Duchas fijasPág.11

Duchas variablesPág.12

Duchas programablesPág.14

Equipo opcionalPág.17

Inicio rápido.....Pág.18

Regulación de la temperatura, Dosificación de barros y aromas.....Pág.19

Esquema eléctrico pantalla táctilPág.20

LA HIDROTERAPIA

Se entiende por hidroterapia aquella forma de tratamiento físico cuyos efectos beneficiosos se deben a la acción térmica y mecánica ejercida por el agua corriente sobre el organismo humano.

Cualquiera que sea la forma de hidroterapia, la aplicación del agua en nuestro cuerpo ejerce siempre un estímulo térmico. Cualquier aplicación brusca de agua fría o caliente, provoca siempre en nuestro organismo una reacción que consiste en una vasoconstricción periférica inicial a la que sigue como reacción, una vaso dilatación periférica, en virtud de la cual, una gran cantidad de sangre afluye desde las vísceras profundas a los vasos sanguíneos cutáneos dilatados, disminuyendo el trabajo que realiza el corazón.

Esta especie de gimnasia circulatoria, primero la vasoconstricción y después la vaso dilatación, es muy beneficiosa para el organismo sano ya que acelera el recambio orgánico y favorece las secreciones en general. La HIDROTERAPIA puede aplicarse en formas de: baño, duchas, compresas...

EFFECTOS TERAPÉUTICOS DEL LA DUCHA BITERMICA

La ducha es la mejor forma de hidroterapia porque al renovarse sin cesar el agua que está en contacto con nuestro cuerpo, provoca la renovación constante de los estímulos mecánicos y térmicos. La ducha secuencial se hace pasar con rapidez chorros de agua caliente y fría, iniciándose siempre con la caliente.

Los efectos beneficiosos que sufre el organismo se dividen en tres apartados:

- a) **REACCIÓN NERVIOSA**
- b) **REACCIÓN CIRCULATORIA**
- c) **REACCIÓN TÉRMICA**



LA REACCIÓN NERVIOSA, es una reacción de sensibilidad, que varía según la temperatura del agua.

Con el agua fría se excita en su más alto grado de sensibilidad periférica, especialmente los vasos superficiales, lo que hace que el sistema nervioso recobre y aumente el tono, de ahí que esta reacción sea eminentemente tónica. El agua caliente produce sobre el sistema nervioso un efecto sedante y ligeramente tónica.

LA REACCIÓN CIRCULATORIA, se concreta en producir según la temperatura del agua de la vasoconstricción o la vaso dilatación. Al contacto con el agua fría los vasos periféricos se contraen palidece la piel y el corazón reduce sus latidos aumentando la presión arterial; pasados unos momentos, la piel enrojece, baja la presión arterial y el corazón acelera sus latidos. Con el agua caliente se producen los dos mismos fenómenos, primero vasoconstricción con hipertensión y más tarde vaso dilatación con hipotensión, este último más acentuado. Ideal para personas con sobrepeso debido al masaje constante de las zonas afectadas.


LA REACCIÓN TÉRMICA, con la aplicación del agua fría, el organismo a través de la sangre fuerza una distribución de riego sanguíneo destinado a reducir la pérdida de calor. Con el agua caliente, la defensa orgánica se organiza mediante una vasodilatación periférica enérgica y por la transpiración.

ORIGEN Y EVOLUCIÓN

El agua representa para el ser vivo en general uno de los elementos esenciales para su supervivencia. Al hombre, entre otras utilidades, ese líquido también le reporta beneficios inestimables cuando es usado en terapias de diversos tipos. Hay documentos que demuestran el conocimiento y la utilización de la hidroterapia ya por los antiguos pueblos chinos, pero su utilización propiamente dicha solamente se difundió a partir del siglo XIX, cuando el pastor protestante Sebastián Kneipp la sistematizó.

La hidroterapia es el proceso terapéutico que consiste en el tratamiento de todo el cuerpo o de algunas de sus partes con agua a temperaturas variadas. Puede contribuir a la curación de las enfermedades más diversas, a través de la presión ejercida sobre el cuerpo y a través de los cambios de temperatura los cuales afectan al sistema nervioso y a la circulación sanguínea.

Aunque las técnicas hidroterapéuticas fueron utilizadas en la antigüedad - Hipócrates (460 a 337 a.C.), por ejemplo, menciona algunas de ellas -, fueron abandonadas durante mucho tiempo y sólo volvieron a cobrar cierta importancia en el siglo XVIII, gracias a los trabajos de los doctores Sigmund Hahn (1664-1742) y su hijo Johann Sigmund Hahn (1696-1773). A partir de esos trabajos, Vincenz Priessnitz (1799-1851) creó la terapia por el agua fría asociándola a aplicaciones sudoríficas y una dieta alimenticia grosera mixta. Pero quien realmente renovó la hidroterapia moderna fue el pastor protestante Sebastián Kneipp (1821-1897), cuyo postulado básico era que las enfermedades aparecen en el hombre cuando su fuerza natural es minada por una alimentación inadecuada y un modo de vida antinatural. Sus métodos, conocidos aún hoy como la "cura de Kneipp", incluían no sólo baños completos y parciales de agua fría y caliente, sino también chorros de agua, ejercicios físicos, el uso de hierbas medicinales y una dieta saludable.

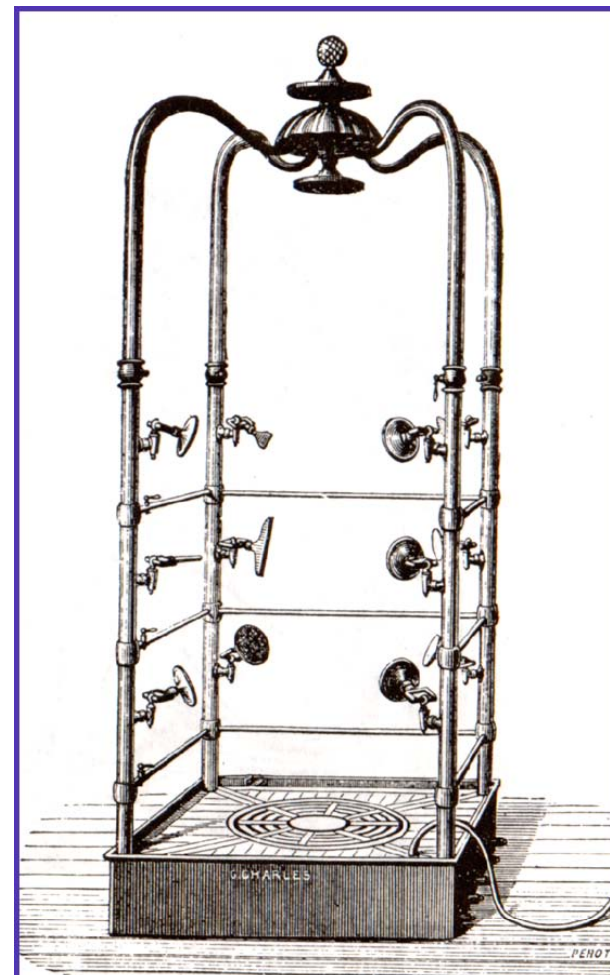

A últimos del siglo pasado la peana multiducha fue un artefacto muy utilizado para aplicar las mas variadas técnicas hidroterápicas, permitiendo orientar los diferentes chorros de agua a las diferentes partes del cuerpo.

También tenía la posibilidad de cambiar la temperatura del agua a través de llaves de paso totalmente manuales.

La medidas de este artefacto eran aproximadamente de 280 cm de altura por un metro de anchura y profundidad.



Hoy día, el desarrollo de la tecnología moderna ha aportado a esta terapia curadora y relajadora una serie de mejoras en los materiales y componentes , que han supuesto una autentica revolución, de forma que se ha transformado en su aspecto , sistema constructivo y eficacia terapéutica. Nuestra empresa ha denominado a esta ducha con el nombre de: **DUCHA TROPICAL BITERMICA.**

DESCRIPCIÓN DE LA DUCHA TROPICAL BITERMICA DE OBRA


La ducha es un habitáculo circular fabricado de medida interior de un 100cm de diámetro x 230 cm de altura .

La cabina se compone de los siguientes elementos:


1. Suelo de forma circular a nivel impermeabilizado y pavimentado con sumidero para conexión a desagüe.
2. Puerta de cristal y marco de aluminio con rejilla para extracción de vapores incorporada. (elemento opcional)
3. Paredes interiores de obra y pavimentado (gresite),
4. Techo de obra en forma circular.
5. Pulsador en el interior de la ducha para iniciar el programa preseleccionado en el programador.
6. Cuadro eléctrico con pantalla digital incorporada, para cambiar los diferentes programas de ducha.
7. Cuadro hidráulico compuesto de válvulas de seguridad para el corte del agua, prefiltros, válvula mezcladora para regular la temperatura del agua caliente y 6 electro válvulas para el control de los diferentes niveles de rociadores.
8. Elemento opcional. Kit de sobre prestaciones terapéuticas, para la inyección de aroma, barros o colores en los diferentes masajes.




SISTEMA CONSTRUCTIVO VISTA EN PLANTA : DUCHA TROPICAL DE OBRA

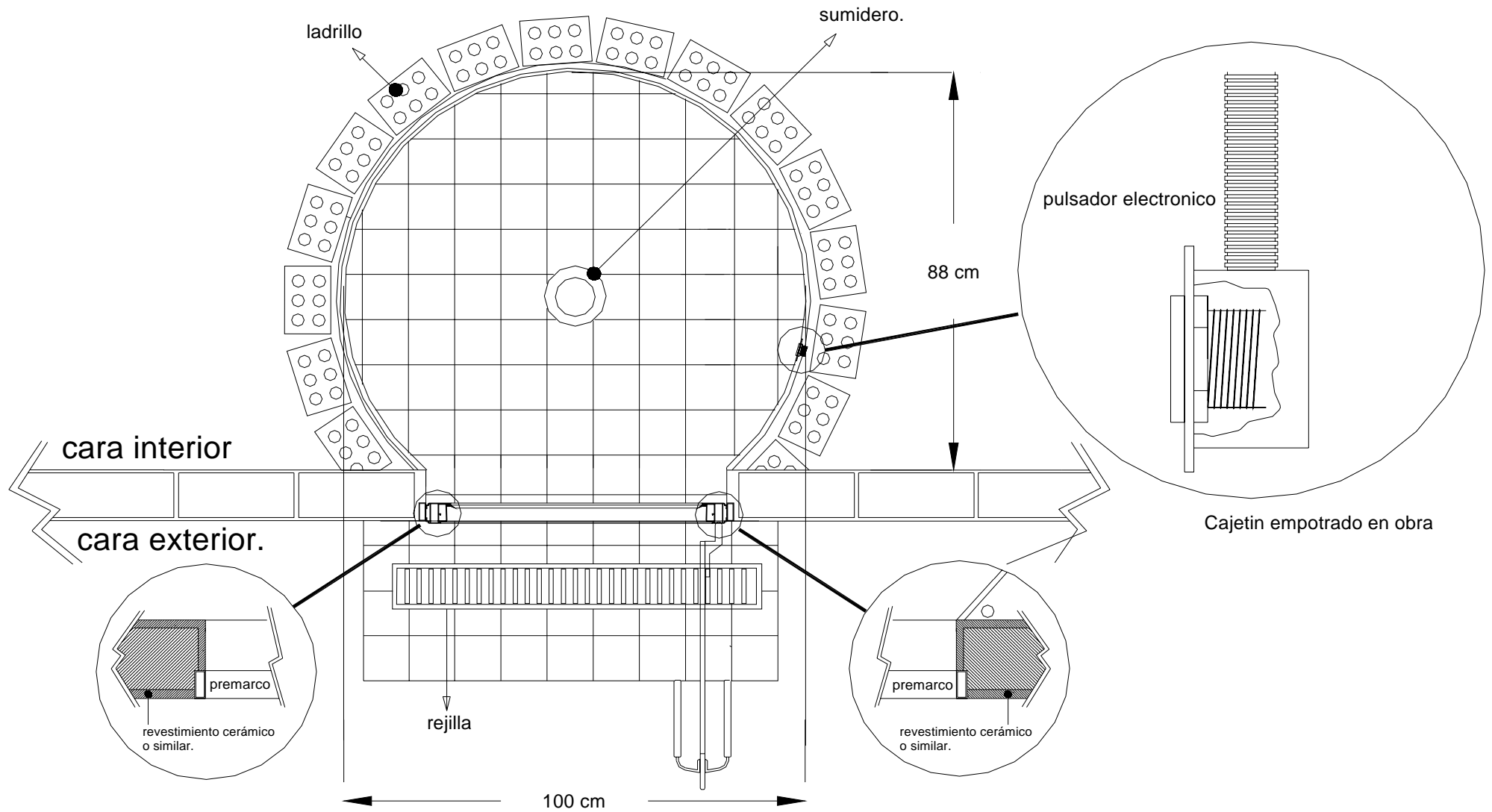


SISTEMA CONSTRUCTIVO VISTA EN ALZADO : DUCHA TROPICAL DE OBRA

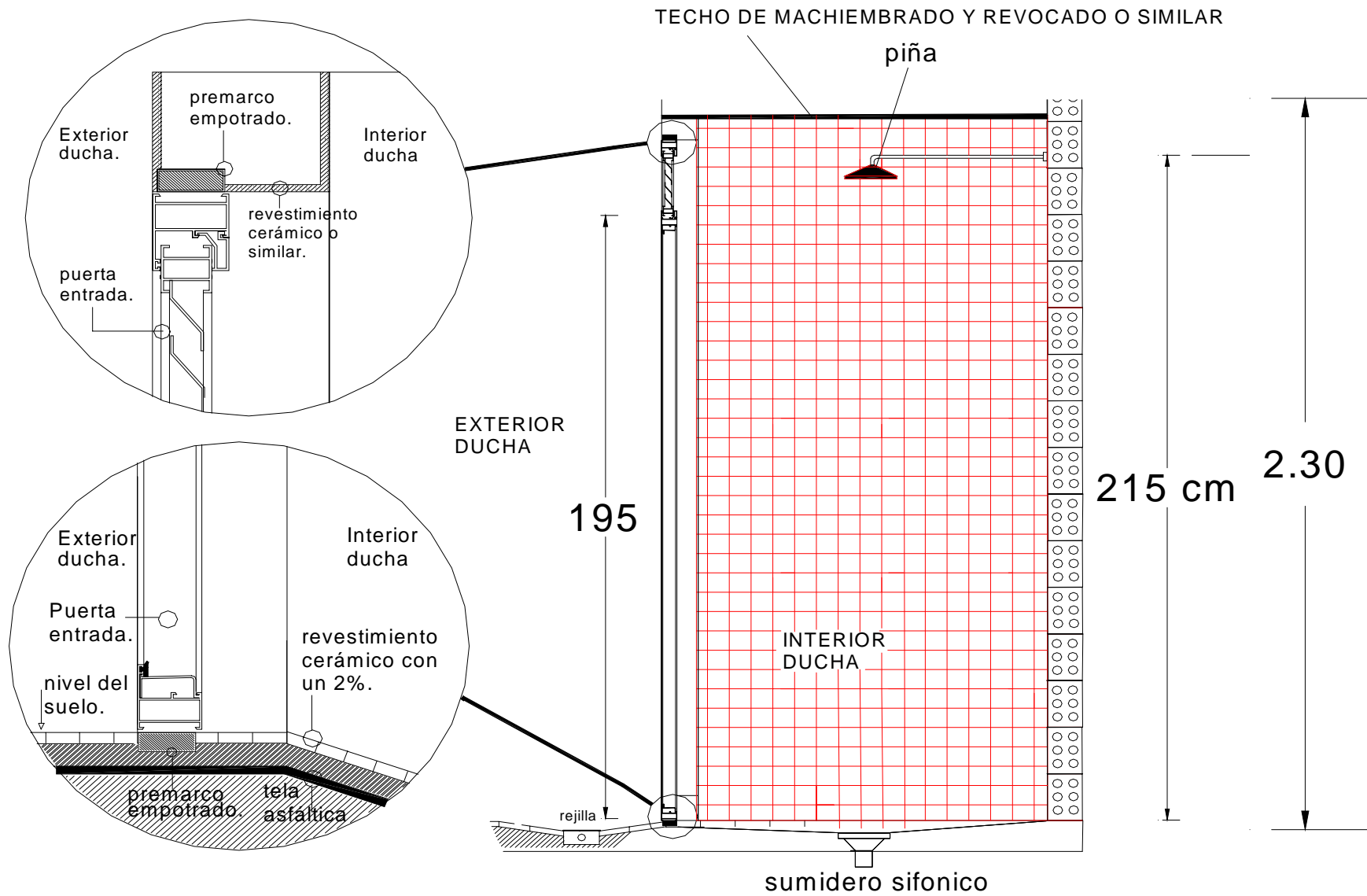

SISTEMA CONSTRUCTIVO DEL EQUIPO HIDRAULICO

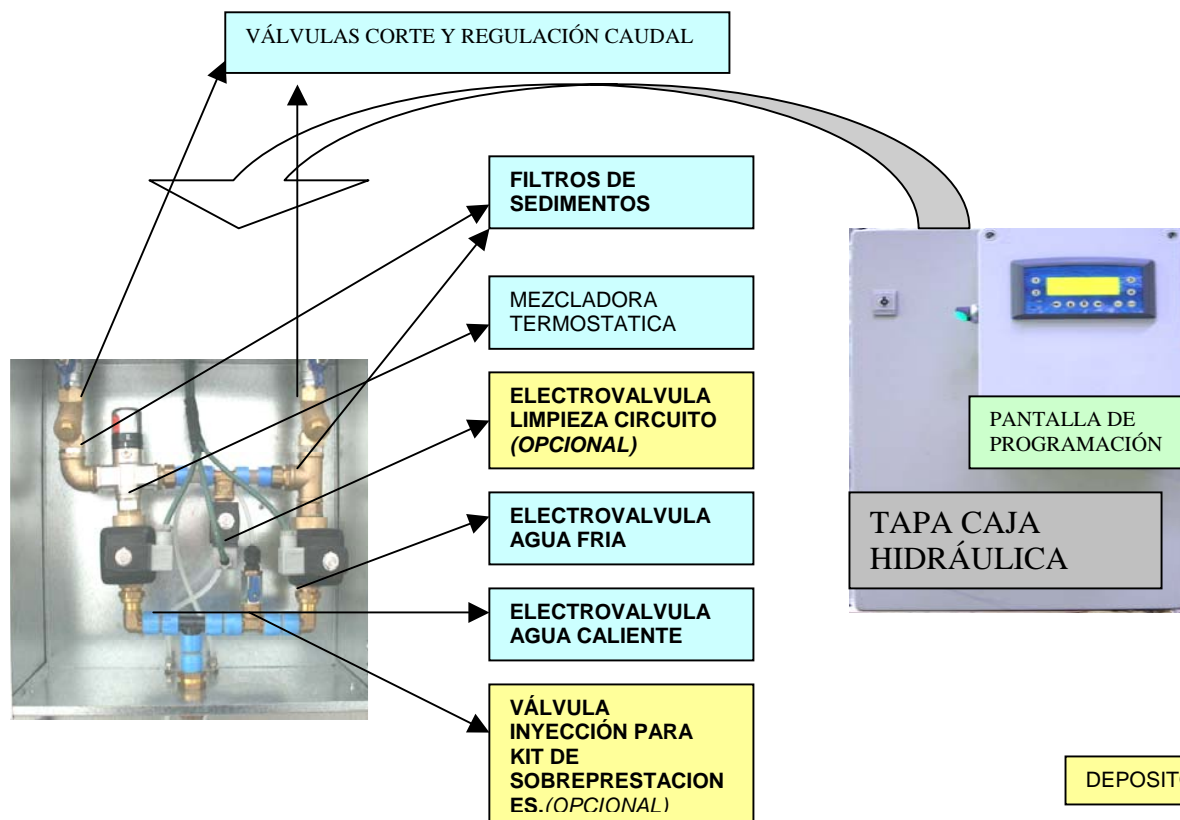

SISTEMA CONSTRUCTIVO KIT SOBREPRESTACIONES

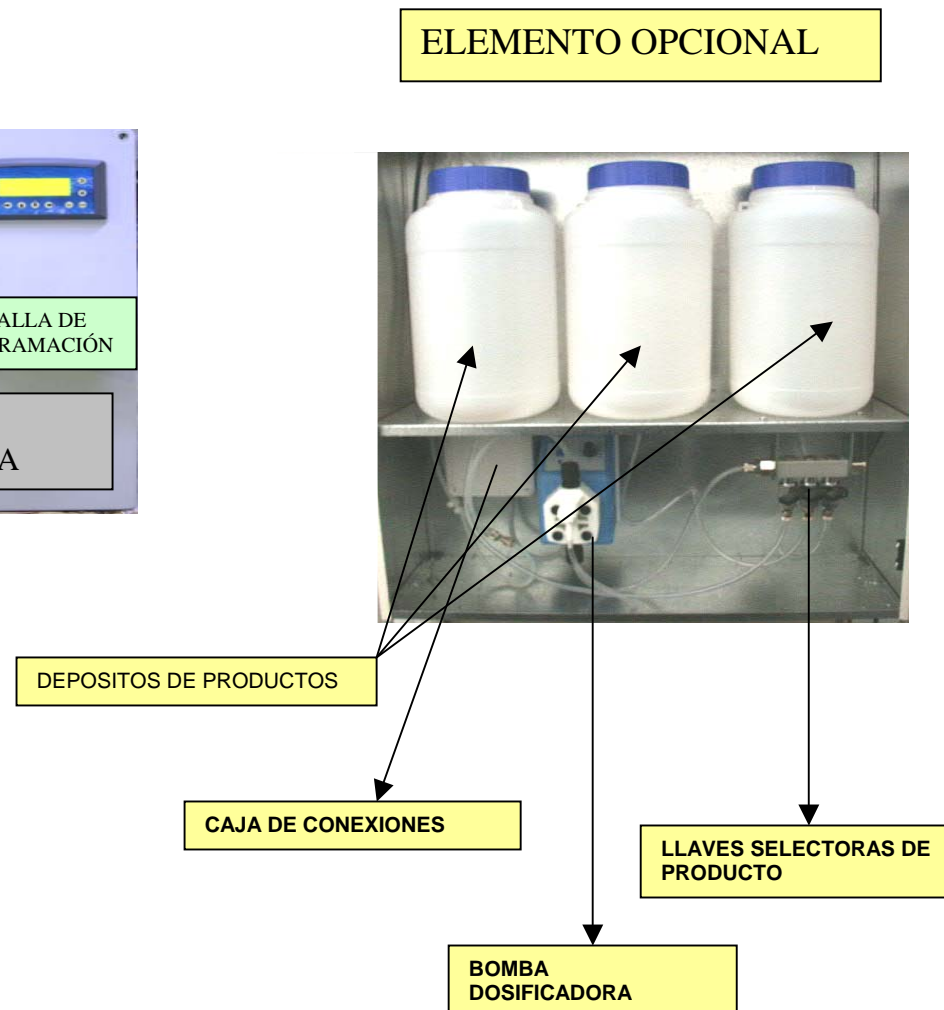


CONSUMO

Para conseguir un efecto terapéutico correcto, es necesario ajustar la presión de agua entre los 2 y 3 kilos de presión.

El consumo total es de 40 a 50 litros por minuto.

Rociador superior

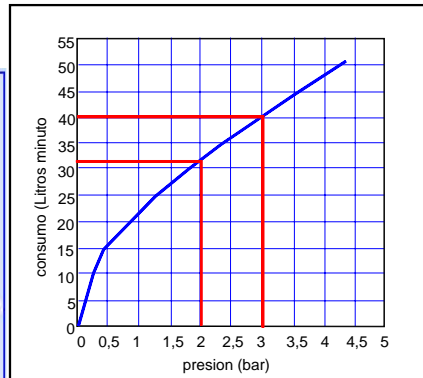


Rociador de diseño especial de 15 cm de diámetro construido en acero, incorpora 48 mini difusores elásticos.

El equipo de válvulas esta equipado con una válvula mezcladora, termostática para poder conseguir una temperatura correcta y obtener los efectos terapéuticos adecuados , la cual es de 34 a 38 grados. El agua fría saldrá a la temperatura que se obtenga de la red, y solo se utilizara durante unos segundos, para realizar cambios rápidos de la temperatura del cuerpo.

CONSUMO TOTAL DE LA DUCHA

Para conseguir una mezcla de agua a 34/38 grados es necesario disponer de un **suministro de agua caliente de 20 a 25 litros de agua a 50 o 60 grados de forma continua por minuto..** Y para conseguir un efecto de agua fría abundante es necesario un **suministro de agua fría de entre 40 y 50 litros por minuto.**

ESQUEMA HIDRAULICO

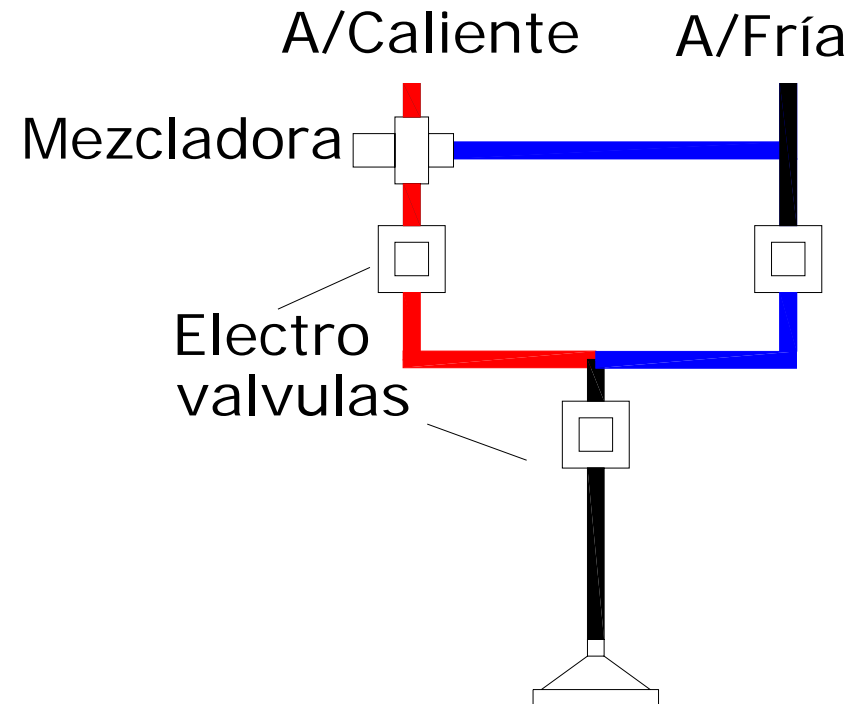

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL MONTAJE

Para la instalación de la ducha son necesarios los siguientes requisitos:

1. Disponer de un espacio de 100 cm de ancho, por 100 cm de profundidad, por 230 cm de altura.
2. Disponer de una sala o armario para la colocación de la maquinaria de las medidas que se detallan en la pag. , que no este mas lejos de 2 o 3 mts de la ducha.
3. Posibilidad de pasar un tubo de desagüe de medidas necesarias para evacuar 50 litros por minuto.
4. Calentador de agua con acumulador capaz de suministrar de forma continua 20 A 25 litros de agua por minuto a una temperatura de 50 o 60 ° y a una presión entre 2 y 3 kilos.
5. Suministro de agua de forma continua de 55 litros por minuto a una presión de tres kilos.
6. Línea eléctrica 500W donde se ubique la maquinaria.

INSTALACIONES PREVIAS AL MONTAJE

Una vez decidida la posición de la ducha, es necesario realizar las siguientes instalaciones.

1. Construcción de las paredes de la ducha de forma circular, con ladrillo con las medidas indicadas en el plano.
2. Suelo impermeabilizado y pavimentado con material antideslizante con una pendiente del 2% a el sumidero sifónico.


En instalaciones publicas, o de uso bastante regular ,es necesaria la instalación de una rejilla o sumidero delante de la ducha, para recoger las salpicaduras de los usuarios al salir de la ducha.

3. Sumidero sifónico de acero inoxidable con salida de 70 mm conectado directamente a ramal de seccion superior , con capacidad de absorber 50 litros por minuto.
4. Tubo de 20 mm con rosca de ½” hembra desde el interior de la ducha a 215 cm del suelo terminado y centrado en la circunferencia . hasta la posición donde se ubica el equipo de válvulas (ver esquema salida).
5. Tubo corrugado de 20 mm desde el interior de la ducha a 150 cm del suelo terminado en un lado de la circunferencia hasta la posición donde se ubica el equipo de válvulas (ver esquema tubo pulsador).
6. Colocación de premarco para ubicación de la puerta (ver sistema de colocación en los esquemas). (elemento opcional)
7. Cierre del techo con material de obra revocado a la altura indicada en el esquema.
8. Alicatado de paredes y techo con material cerámico , gresite, mármol o similar .
9. Para realizar el montaje es imprescindible que las tomas de agua luz y desagües que a continuación se detallan estén en servicio para poder realizar las pruebas al montaje.

SITUACIÓN DE LA MAQUINARIA

La maquinaria puede estar ubicada en varios sitios, por ejemplo:

1. En una habitación adosada a la ducha.
2. Por encima de la ducha o en el falso techo si disponemos de una altura total de 3 m.
3. Una vez decidida la ubicación de la maquinaria realizaremos las siguientes instalaciones tal como se indica en el siguiente esquema.
4. Toma de agua caliente con llave de paso de $\frac{3}{4}$ rosca hembra con capacidad de suministrar 25 litros por minuto a una temperatura de 50 a 60 grados de forma continuada. En la posición que indica el siguiente esquema.
5. Toma de agua fría con llave de paso de $\frac{3}{4}$ rosca hembra con capacidad de suministrar 50 litros por minuto. En la posición que indica el siguiente esquema.
6. Línea eléctrica 220-II+N+T 500 W protegida con magneto térmico y diferencial independiente.

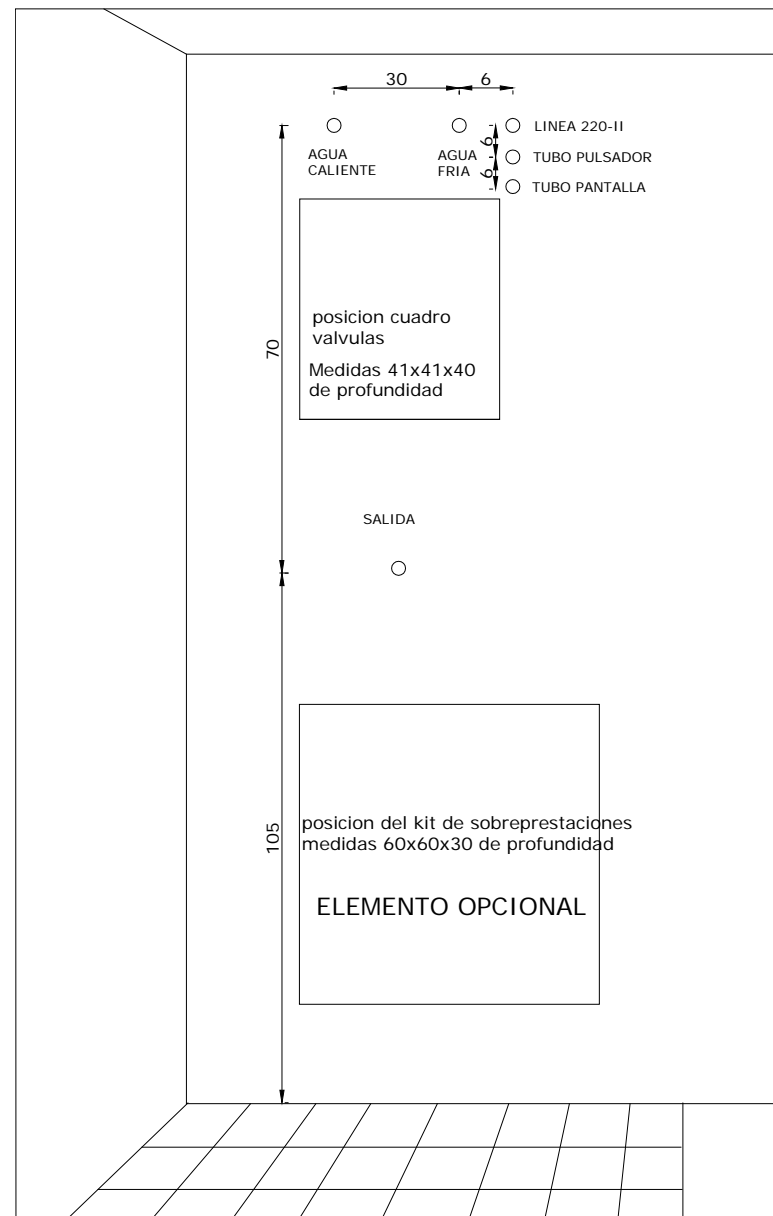

ENCENDIDO DEL EQUIPO


El equipo se encenderá al conectar el interruptor situado en la caja eléctrica.

Al dar tensión aparecerá una animación que nos dará la bienvenida y el nombre del tipo de ducha.

La pantalla de navegación es táctil para facilitar su manejo.

Navegación

Al encender el equipo aparecerá la pantalla principal que se detalla a continuación:

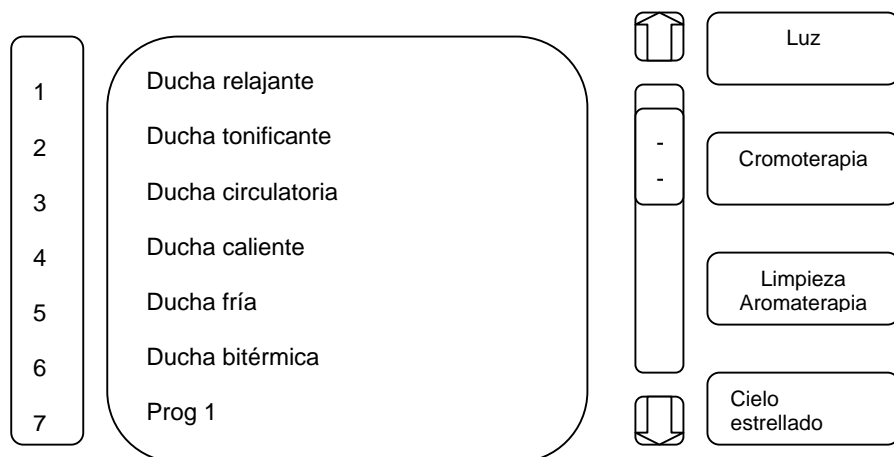

Antes de empezar cualquier masaje se recomienda realizar una limpieza de los conductos de la aromaterapia si se ha utilizado alguno de los productos de los depósitos y se va a utilizar otro producto diferente o ninguno

Esta acción se realiza apretando la tecla "limpieza aromaterapia"

LISTA DE DUCHAS

Programas

Los programas están divididos en:

- **Fijos:** Estos son de secuencia y tiempos fijos, no se pueden cambiar en ningún aspecto (programas del 1 al 3)

- **Variables:** programables únicamente el tiempo de agua fría y agua caliente pero de forma general para todos los variables. También podemos modificar la duración total de cada uno en particular. (programas del 4 al 6)
- **Programables por el usuario:** Los veinte últimos, podremos modificar totalmente su secuencia, su duración y su nombre, Incluso se pueden programar secuencias de activación / desactivación de la aromaterapia y cromoterapia. Estos programas vienen sin programación de fábrica.


DUCHAS FIJAS

Son masajes programados por fisioterapeutas siguiendo unas pautas para conseguir el máximo efecto terapéutico.

- **Ducha relajante:** Es un masaje en el cual únicamente se rocía con agua caliente, tiene una duración total de 8 minutos
- **Ducha tonificante:** Es un masaje que combina 2 minutos de agua caliente y 50 segundos de agua fría. Tiene una duración total de 10 minutos.
- **Ducha circulatoria:** Es un masaje que combina 75 segundos de agua caliente con 25 segundos de agua fría. Tiene una duración total de 10 minutos.


Navegación

Al acceder a cualquier programa fijo, aparecerá la siguiente pantalla:

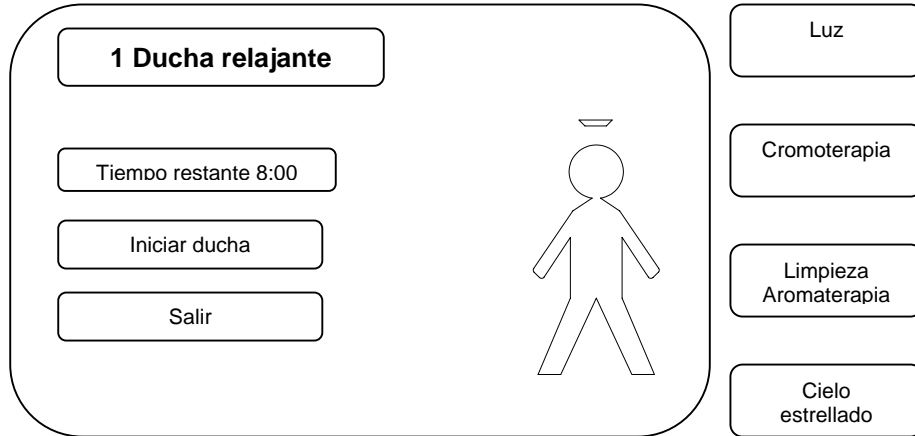

Para el inicio del masaje únicamente pulsaremos sobre la tecla “Iniciar ducha”

Teclas comunes para los programas fijos

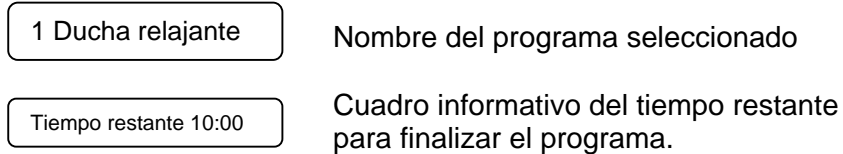

DUCHAS VARIABLES


Estos programas siguen una secuencia fija pero con la diferencia que la duración de todos los masajes es configurable, así como el tiempo de agua caliente y fría.

Tipos de duchas variables:


- **Ducha caliente:**
Tratamiento de una secuencia en el cual solo actúa el agua caliente
Tiempo total programable.
- **Ducha l fría:**
Tratamiento de una secuencia en el que únicamente actúa el agua fría
Tiempo total programable.
- **Ducha tropical bitérmica:**
Tratamiento de una secuencia en el cual se va alternando entre agua fría y caliente
Tiempo total programable.

Navegación


Al acceder a cualquier programa variable, aparecerá la siguiente pantalla:

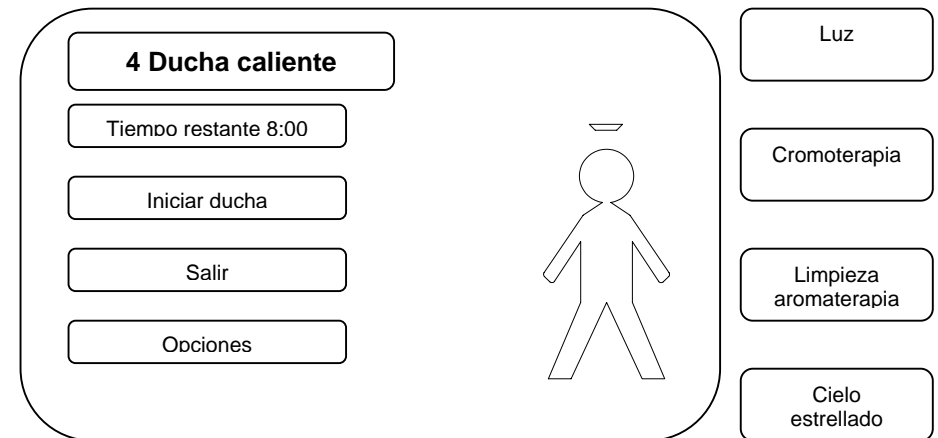

La única tecla que cambia respecto los programas fijos es la tecla “opciones”, si la pulsamos aparecerá la siguiente pantalla:

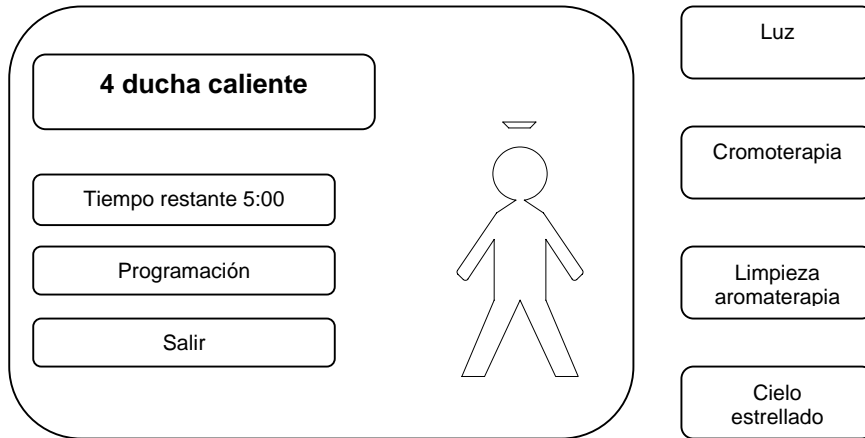


Si pulsamos la tecla programación:

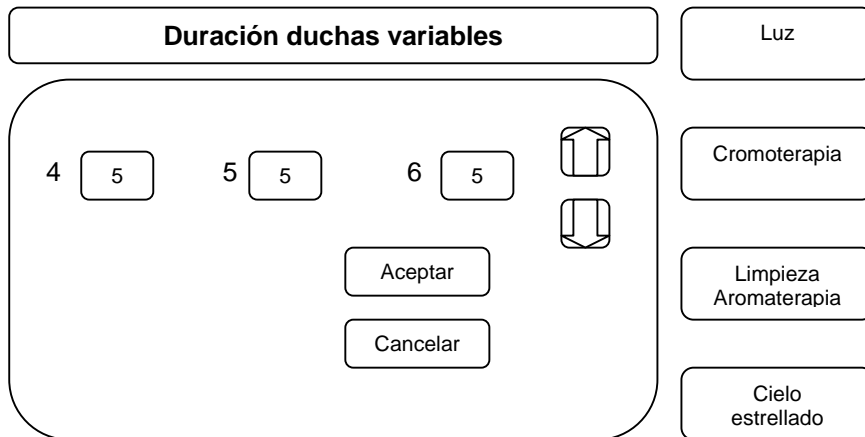

En esta pantalla podremos cambiar el tiempo total de cada uno de los programas variables, manteniendo pulsado el programa que deseamos rectificar y a continuación tecleando las flechas que aparecen a la derecha de la pantalla.

Una vez asignado el tiempo deseado al programa variable, pulsaremos “aceptar” para validarlo y a continuación nos aparecerá la siguiente pantalla:

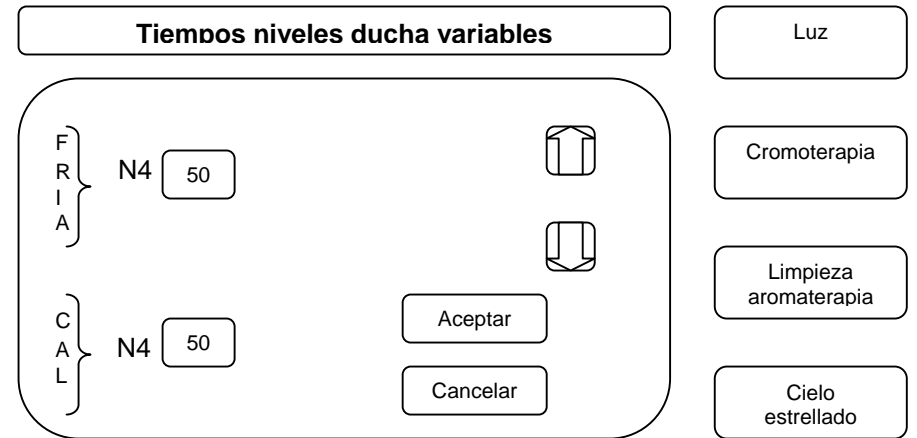

En este submenú se introducirá el tiempo deseado para cada nivel de agua fría y caliente, para validar la selección seguiremos los pasos anteriores.


Los cambios efectuados en los tiempos afectaran a todos los programas programables.

En todos los programas variables se iniciara de nuevo la secuencia dependiendo de que la programación total sea suficiente. Por ejemplo si activamos la ducha relajante a 60 segundos de agua fría y 60segundos de agua caliente, y el tiempo total es de 1 minuto, la secuencia no podrá terminar ya que la suma de tiempos de agua caliente y fría (120 segundos) es superior al tiempo total programado (60 segundos).

Para evitar este problema deberemos cuadrar el tiempo individual de agua fría y caliente con el tiempo total del masaje.

Atención:

Si el tiempo total y la suma de los tiempos no cuadra nos aparecerá la siguiente pantalla informativa:

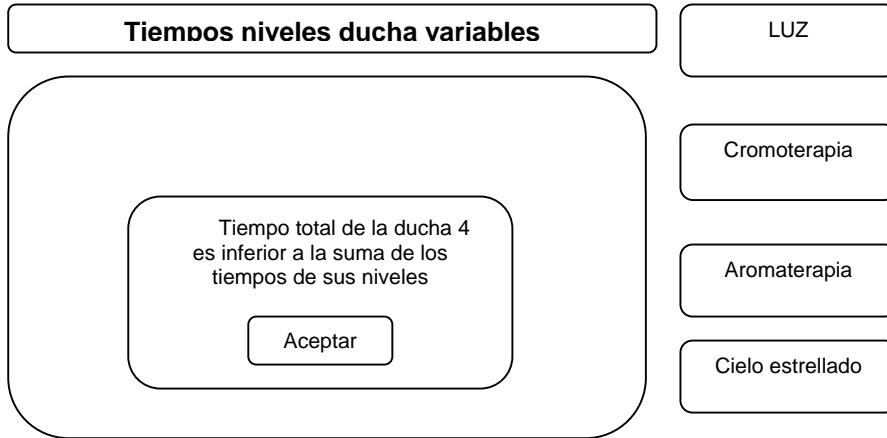


Si pulsamos aceptar la ducha únicamente se guiará por el tiempo total y se parará en la última fase del masaje si el tiempo de los niveles es superior al tiempo total.


Si por el contrario el tiempo de los niveles es inferior al tiempo total al acabar el masaje empezará de nuevo, hasta que el tiempo total se agote.


DUCHAS PROGRAMABLES

Los masajes programables vienen vacíos de fábrica. Para programarlos apretaremos el programa asignado por ejemplo "16 prog 1" en el menú principal y nos aparecerá la siguiente pantalla

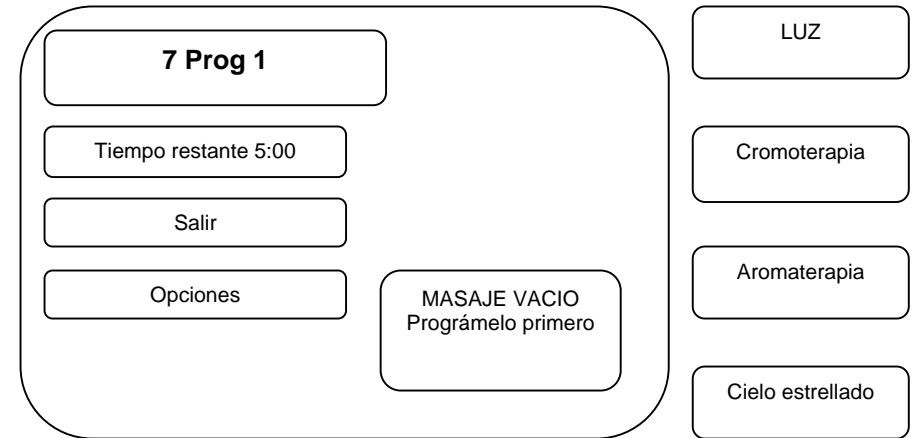


Al apretar la tecla opciones:

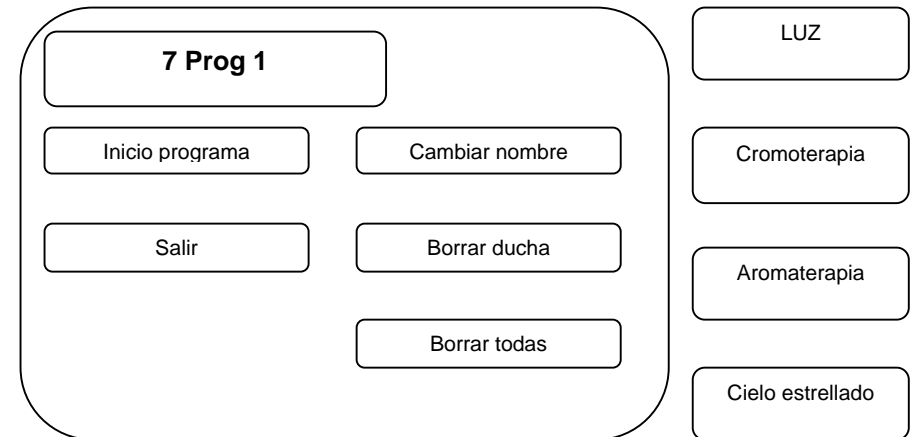

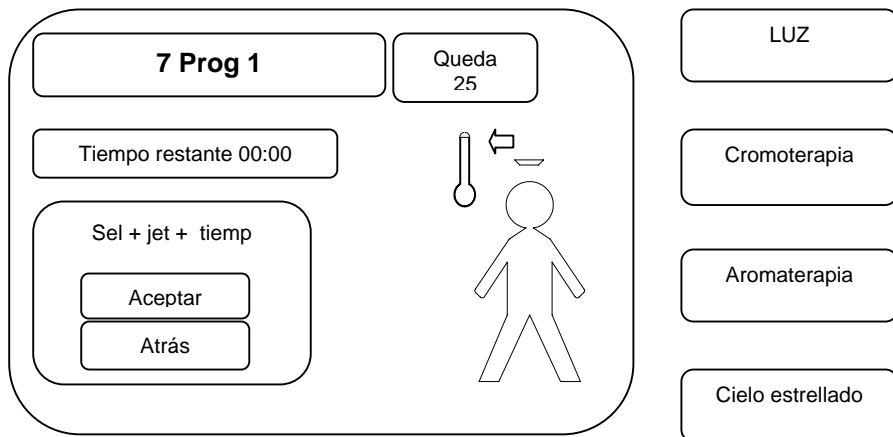


Al pulsar aceptar empezara la grabación:

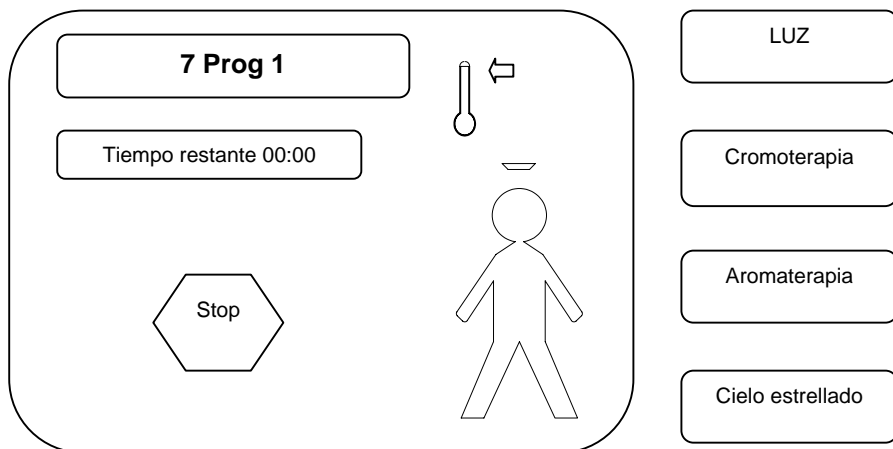

La programación de los masajes se hace “en directo” mientras una persona esta en la ducha el operador va cambiando la temperatura del agua.


Para variar la temperatura pulsaremos sobre la flecha que esta al lado del termómetro desplazándola a la temperatura deseada.

Ahora cuando queramos podremos pulsar el termómetro, algo que deseemos cambiar en la siguiente maniobra, el programa se parará y aparecerá la siguiente pantalla:

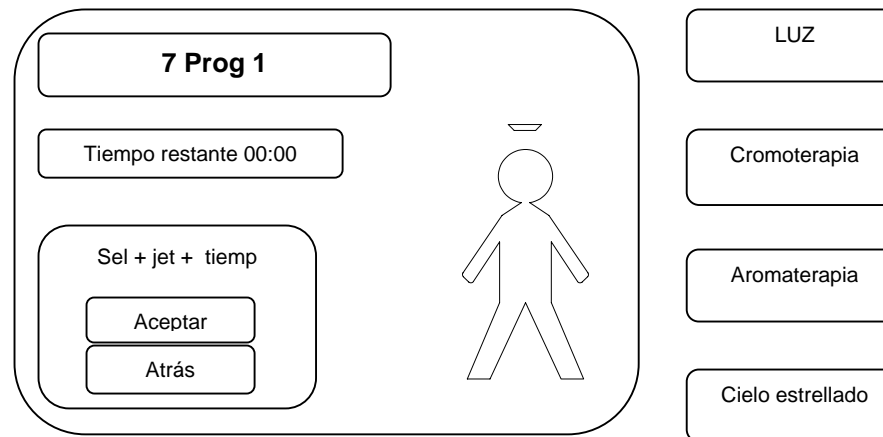


Al pulsar aceptar el programa empezara con la nueva configuración. Para reanudarlo con la modificación pulsaremos aceptar Así iremos introduciendo los diferentes cambios.


Cuando queramos parar el masaje, que ya hemos programado, en el momento deseado apretaremos stop y nos aparecerá la siguiente pantalla:

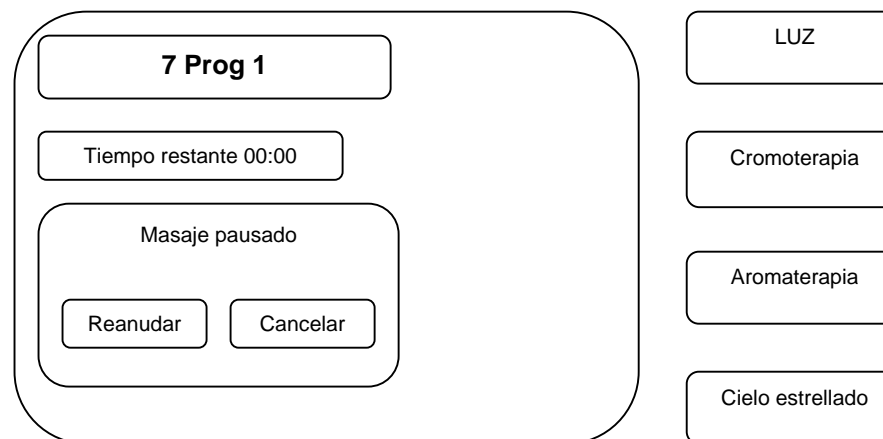

Cuando el masaje se haya programado un mínimo de tiempo, nos parecerá la siguiente pantalla:

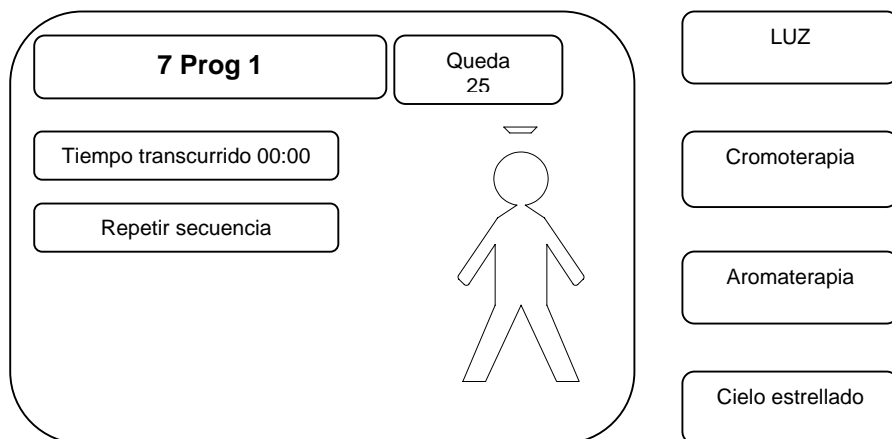


Al teclear repetir secuencia, podremos introducir el numero de veces que queremos que se repita el masaje que hemos programado utilizando las flechas para aumentar o disminuir el numero:

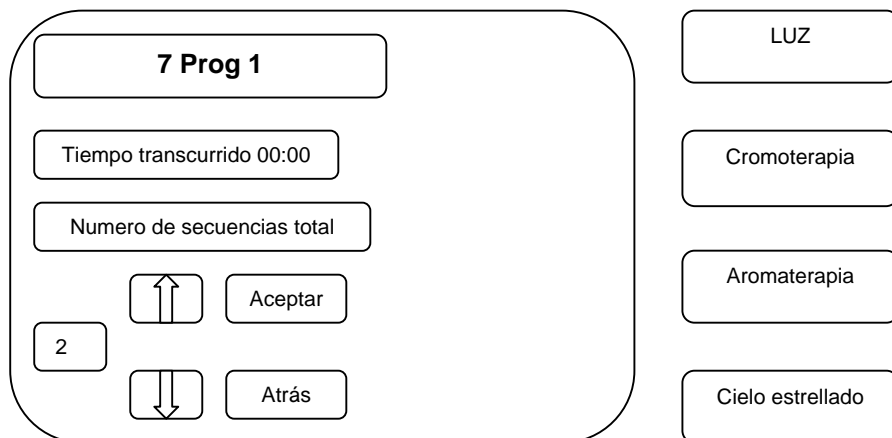

Para validarlo teclearemos "aceptar".

Cuando queramos terminar la programación del masaje apretaremos la tecla "stop" y nos aparecerá:

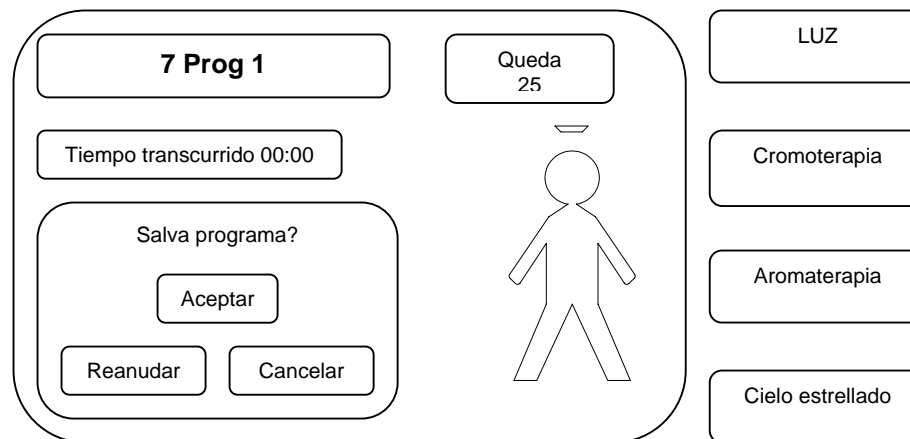

Teclearemos "aceptar" para guardar el masaje o "reanudar" si queremos continuar con la programación.

Si deseamos salir sin guardar teclearemos "Cancelar"

Una vez tengamos el masaje programado le podremos dar un nombre tecleando "cambiar nombre", donde nos aparecerá un teclado tipo "QWERTY" (como el de los ordenadores), introduciremos el nombre y la tecla aceptar.

A partir de este momento el masaje aparecerá en el menú principal con el nombre que le hemos dado.

Si por lo contrario queremos borrar una de las duchas que ya hemos programado anteriormente teclearemos "borra ducha" y "aceptar"

Pero si lo que deseamos es borrar todos los masajes programados teclearemos "borra todas" y "aceptar".

EQUIPO OPCIONAL

Luz

Esta tecla enciende y apaga la luz de la cabina. Por defecto se encuentra apagada al dar tensión al equipo.

Si cuando encendemos la luz, la cromoterapia ya esta encendida, al apagarla recuperamos el estado previo de la cromoterapia.

En los equipos con cromoterapia la luz blanca se obtiene mezclando los tres colores RGB (rojo, verde, azul). En los otros equipos se conecta una lámpara de iguales características eléctricas a cualquiera de las tres conexiones de la cromoterapia.

Aromaterapia

Esta tecla activa y desactiva la función del kit de sobreprestaciones, y solo aparece si este está instalado

Cromoterapia

Solo aparece si la cromoterapia esta instalada. Se enciende y se apaga con una sola pulsación

Realizando una pulsación prolongada se accede el submenú siguiente

1 Ducha relajante

Tiempo restante 10:00

Iniciar ducha

Salir

Verde

Rojo


Cián

Azul

Amarillo

Magenta

Salir

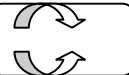

En esta pantalla se podrá elegir un color de los que aparecen pulsando la tecla del mismo o incluso un modo especial en el cual aparecerán alternándose todos los colores cambiando de color cada veinte segundos que se realizara apretando la tecla en la que aparecen las flechas.


Cuando creamos un masaje programable también gravamos las acciones sobre la cromoterapia. Si durante la posterior ejecución del masaje accionamos la cromoterapia, a partir de ese punto se queda fija tal y como la hemos dejado y el sistema ya no hace caso de otros cambios que pueda haber en el masaje programable.

INICIO RÁPIDO


- INICIO DE DUCHA

El equipo se encenderá al conectar el interruptor situado en la caja eléctrica.

Al conectarlo nos aparecerá la pantalla principal siguiente:

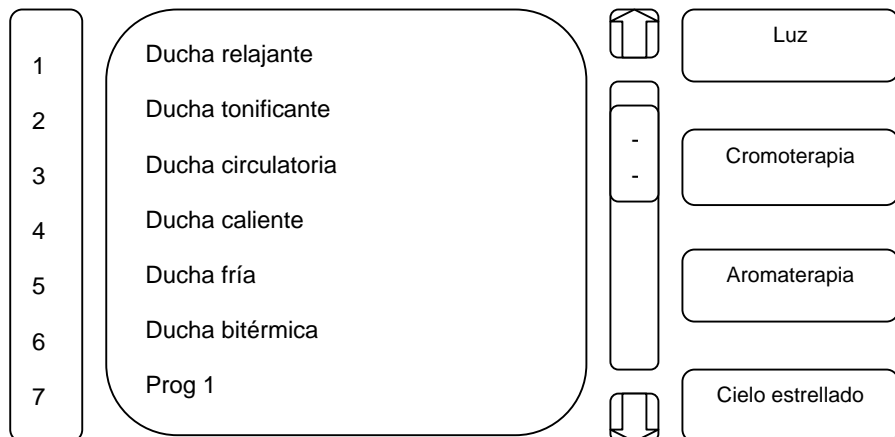


En esta pantalla elegiremos la ducha deseada pulsando sobre la misma, por ejemplo “ducha bitérmica” y nos aparecerá la siguiente pantalla:

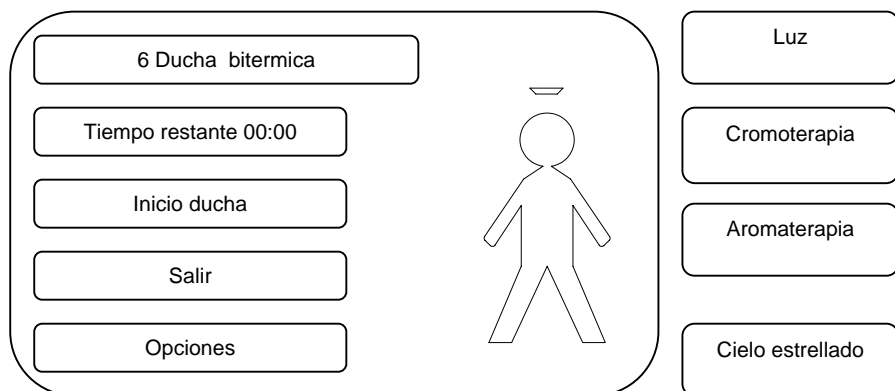

Si queremos iniciar la ducha con el tiempo preprogramado de fábrica teclcaremos “iniciar ducha”


- PROGRAMACIÓN

Pero si por el contrario queremos variar los tiempos totales o de cada nivel teclcaremos “opciones” y “programación”, a continuación aparecerá la siguiente pantalla:

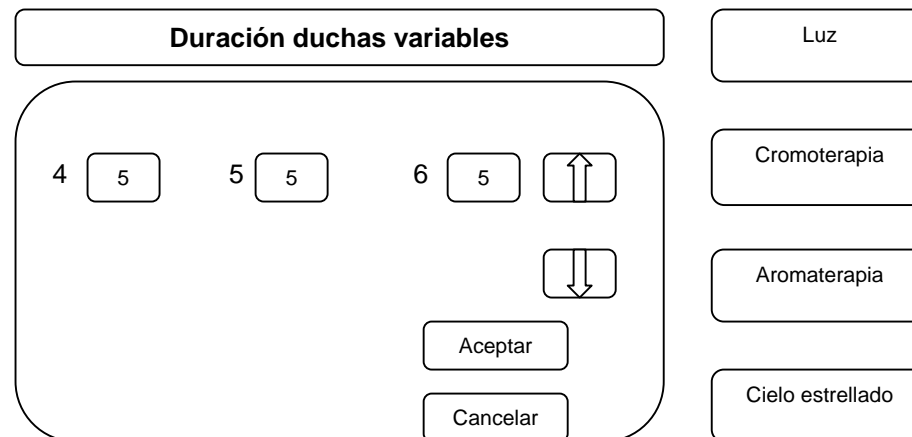

En esta pantalla podremos modificar los tiempos totales de todas las duchas variables.

Elegiremos el tiempo deseado navegando con las flechas, una vez elegido, pulsaremos aceptar para validarlo, entonces nos aparecerá la siguiente pantalla en la cual podremos elegir los tiempos de agua fría / caliente.

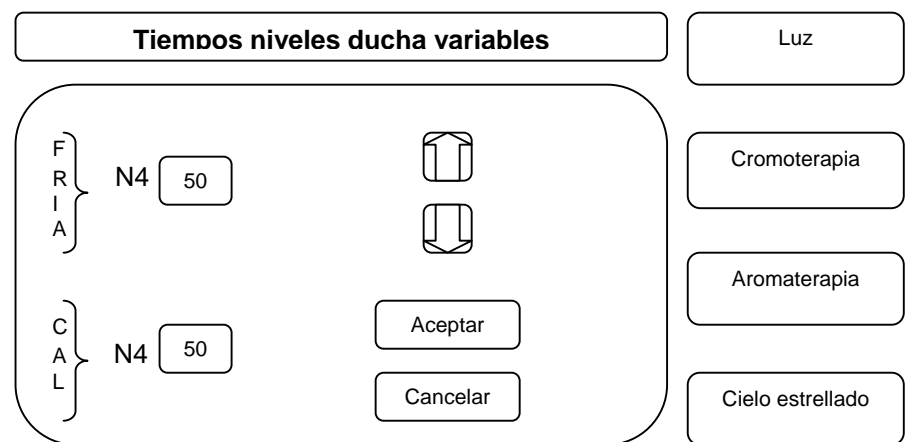

REGULACION DE LA TEMPERATURA



La temperatura del agua caliente de la ducha se regula a través de la válvula termostática situada en el cuadro de válvulas, para regular girar el mando hasta hacer coincidir la temperatura deseada, con la línea de referencia. Como seguridad, para sobrepasar los 35 grados de regulación hay que presionar el botón rojo y hacer girar el mando al mismo tiempo.


La temperatura del agua fría no es regulable estará a la temperatura a la que entre de la red.

El equipo opcional de sobre prestaciones se compone de tres depósitos para llenarlos con los diferentes productos . aromas, colores, etc. Estos depósitos están conectados a un colector con tres válvulas manuales para poder seleccionar el producto que deseemos. **Atención. No abra mas de una llave de paso para evitar que se mezclen los productos.**



Compruebe que la llave de paso del la inyección del aroma situada en el cuadro de válvulas se encuentra abierta.

DOSIFICACIÓN DE BARROS Y AROMAS.

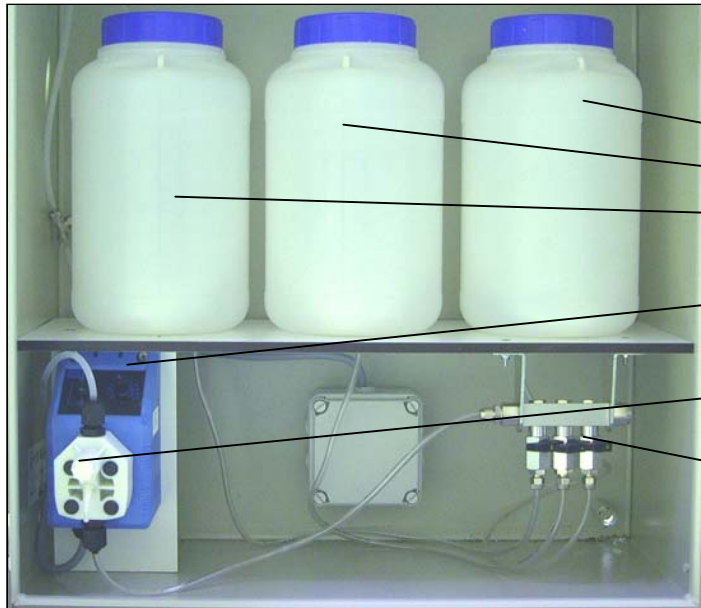

DEPOSITOS

BOMBA DOSIFICADORA

PURGADOR DE AIRE

COLECTOR SELECCIÓN DE PRODUCTO

Al activar 3.AROMA SI en cualquiera de los programas se activara la bomba dosificadora , que ira inyectando el producto a los conductos de la instalación.

En caso de que los depósitos se queden sin producto y la instalación absorba aire deberá realizar una purga hasta que salga el producto por el purgador.

ESQUEMA ELÉCTRICO GENERAL CON PANTALLA TÁCTIL

